



救急搬送時の救急隊員・医療従事者様を新型コロナウイルス感染症から守る

# 隔離搬送カプセル ストレッチャー用

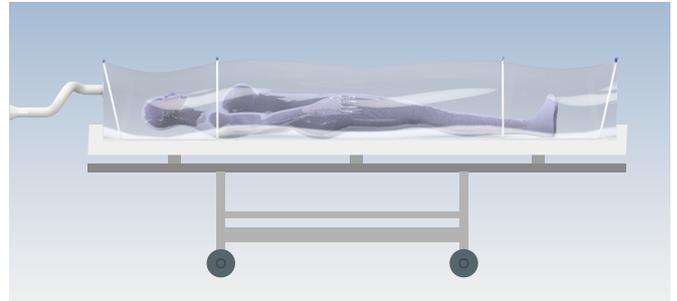

患者搬送用ストレッチャーに設置し、感染症患者の隔離搬送が可能

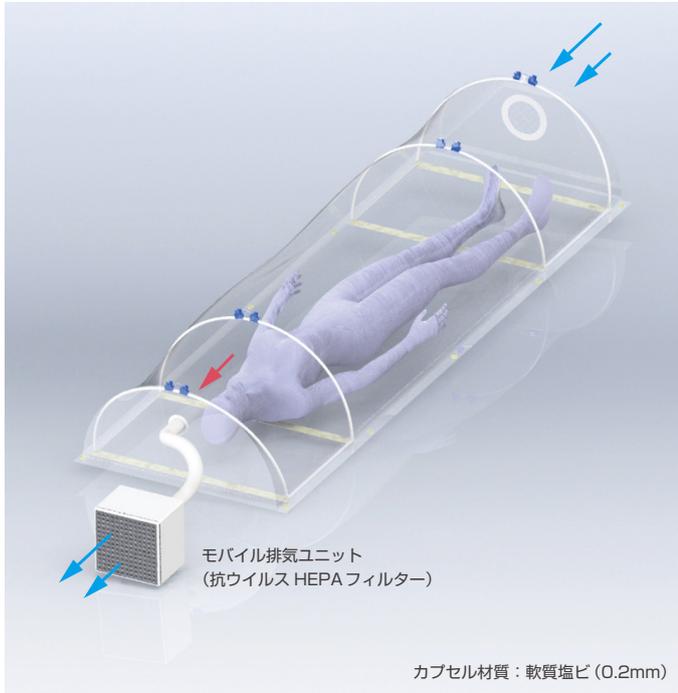

カプセル内部の汚染空気を抗ウイルスHEPAフィルターを通して外部へ排気

モバイルバッテリーでも稼働可能

コンパクト収納で廃棄・焼却が可能

## 特長 |

- カプセル内の空気は抗ウイルスHEPAフィルターを通して排気され、捕集したウイルスは不活性化されます。
- 展開したカプセルに排気ユニットのダクトを装着すると簡易な陰圧環境となります。
- モバイルバッテリーでも稼働可能です。
- カプセル全体に金属性のパーツを使用していないため、使用後は完全に焼却することができます。

## 組立方法 かんたん4ステップ

1| 開封して広げる 2| ファスナーを全開 3| ワイヤーを起こしてクリップで止める 4| ユニットのホースをカプセルに結合

## 参考仕様 |

型番	展開時 外形寸法(mm) ※カプセルのみ	収納時 外形寸法(mm) ※カプセルのみ	排気風量 ( $m^3/min$ )	重量	連続使用時間	価格(税別)
DCT-13	W1980×D660×H400	W670×D500×H50	0.25	カプセル：約3kg モバイル排気ユニット：約1.8kg	約8時間 (10,000mAh)	¥150,000


 ISO9001 / ISO14001  
の認証を取得しています。

製品の内容に関するお問い合わせ窓口

☎ 072-806-7800 ✉ info@s-shin-ei.co.jp



本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町1番10号  
TEL/072-806-7800 FAX/072-806-7801  
関東営業所 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4-3  
TEL/048-747-7300 FAX/048-747-7880

<https://www.s-shin-ei.co.jp>

ご用命は当代理店まで